

ROZLOŽENÍ A SLOŽENÍ ZAJIŠŤOVACÍHO ŠROUBOVÁKU HEX



ROZLOŽENÍ

- 1 Povolte modrou matici ve směru symbolu odemčení.



- 2 Vysuňte matici a vnitřní člen ven ze šroubováku.



- 1 Vložte vnitřní člen do drážky těsně za závit pod definovaný sklonem.



- 2 Vsuňte modrou matici nad umístěný vnitřní člen.




- 3 Posuňte vnitřní člen do drážky.



- 4 Zašroubujte modrou matici ve směru symbolu uzamčení.



i Mírnými pohyby vnitřního členu ve směrech vyznačených šipkami musí dojít k zajištění háčku uvnitř drážky modré matice.

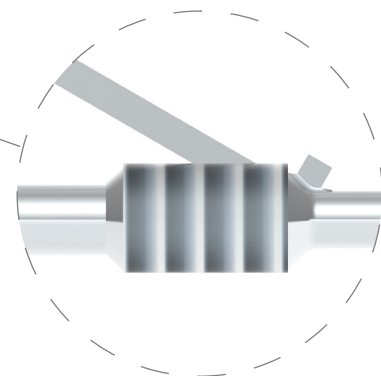

MEDIN, a.s., Vlachovická 619, 592 31 Nové Město na Moravě,
Česká republika, tel: +420 566 684 327, prodej@medin.cz,
www.medin.cz



Název dokumentu: MLL_51741_CS
Číslo a datum poslední revize: R01_2026-05-04



prodej@medin.cz / www.medin.cz