

ROZLOŽENÍ A SLOŽENÍ ZAJIŠŤOVACÍHO ŠROUBOVÁKU HEX



ROZLOŽENÍ



- 1 Povolte modrou matici ve směru symbolu odemčení.




- 2 Vysuňte matici a vnitřní člen ven ze šroubováku.




- 1 Vložte vnitřní člen do drážky těsně za závit pod definovaným sklonem.



- 2 Vsuňte modrou matici nad umístěný vnitřní člen.
- i** Mírnými pohyby vnitřního členu ve směrech vyznačených šipkami musí dojít k zajištění háčku uvnitř drážky modré matice.

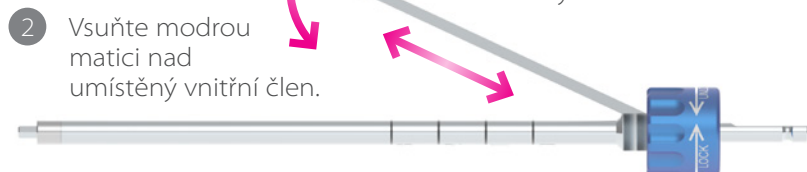

- 3 Posuňte vnitřní člen do drážky.

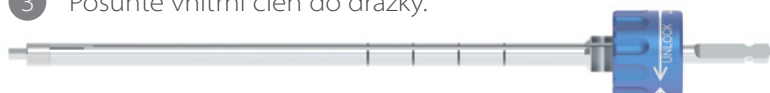

- 4 Zašroubujte modrou matici ve směru symbolu uzamčení.



MEDIN, a.s., Vlachovická 619, 592 31 Nové Město na Moravě,
Česká republika, tel: +420 566 684 327, prodej@medin.cz,
www.medin.cz



Název dokumentu: MLL_51747_C_CS
Číslo a datum poslední revize: R00_2026-02-02



prodej@medin.cz / www.medin.cz