


ROZLOŽENÍ A SLOŽENÍ ZAJIŠŤOVACÍHO ŠROUBOVÁKU T15




ROZLOŽENÍ

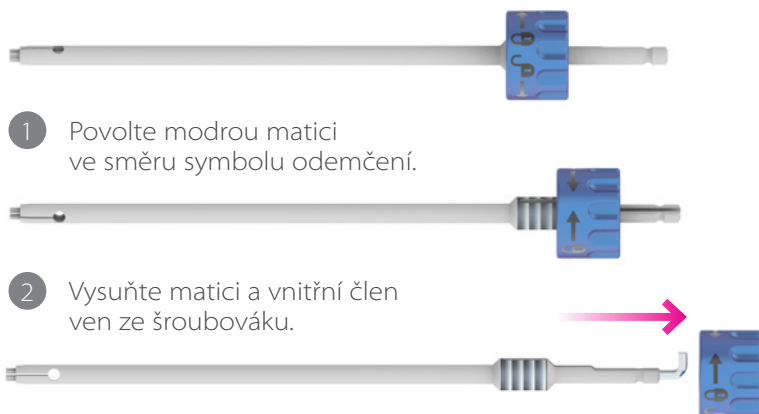

1 Povolte modrou matici ve směru symbolu odemčení.

2 Vysuňte matici a vnitřní člen ven ze šroubováku.

SLOŽENÍ

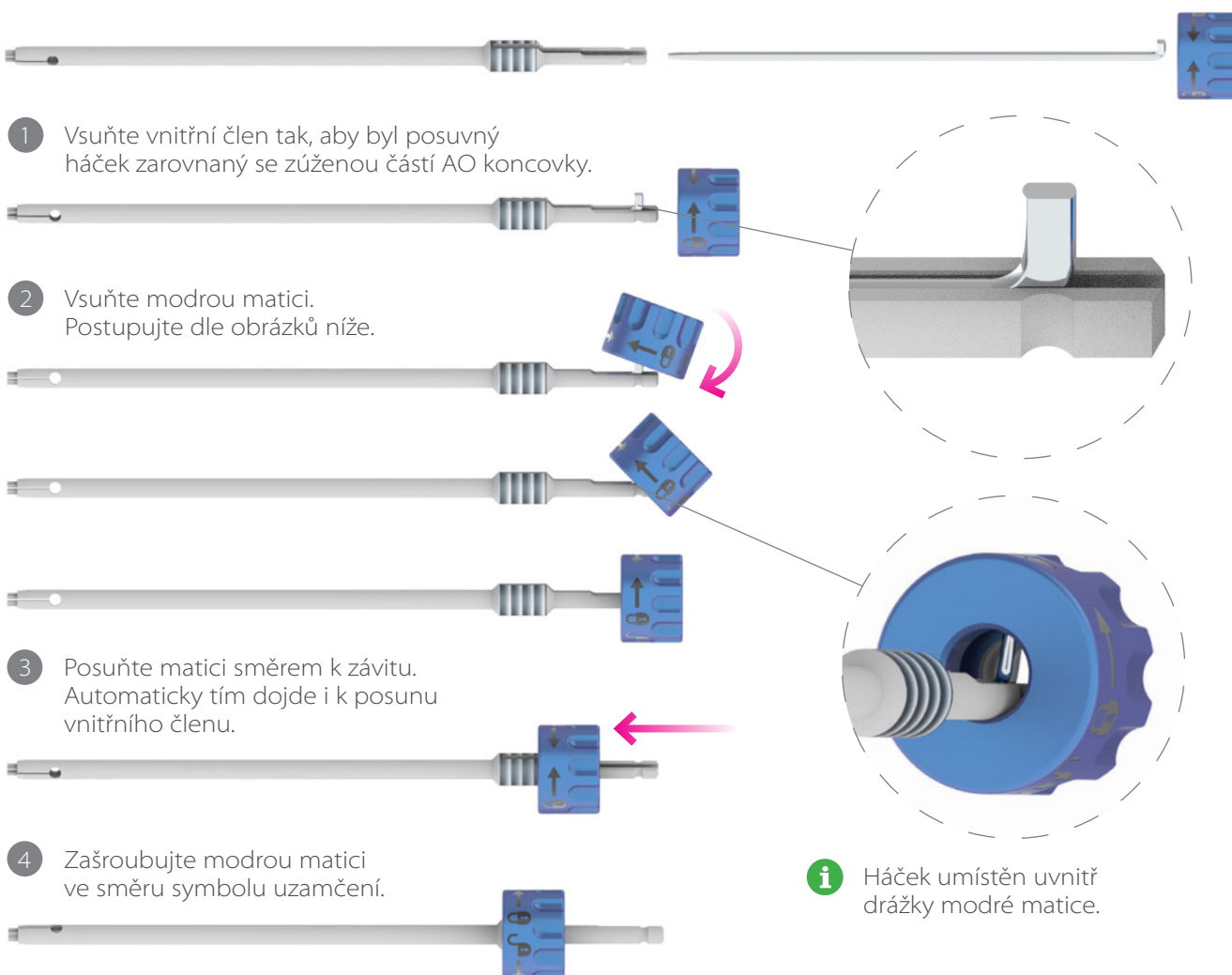

1 Vsuňte vnitřní člen tak, aby byl posuvný háček zarovnaný se zúženou částí AO koncovky.

2 Vsuňte modrou matici. Postupujte dle obrázků níže.

3 Posuňte matici směrem k závitu. Automaticky tím dojde i k posunu vnitřního členu.

4 Zašroubujte modrou matici ve směru symbolu uzamčení.

i Háček umístěn uvnitř drážky modré matice.



MEDIN, a.s., Vlachovická 619, 592 31 Nové Město na Moravě,
Česká republika, tel: +420 566 684 327, prodej@medin.cz,
www.medin.cz



Název dokumentu: MLL_51747_B_CS
Číslo a datum poslední revize: R00_2026-01-27



prodej@medin.cz / www.medin.cz